

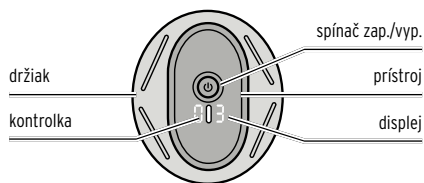


Korektor držania tela

SK Návod na použitie

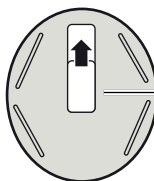


Pred použitím odstráňte všetok obalový materiál.

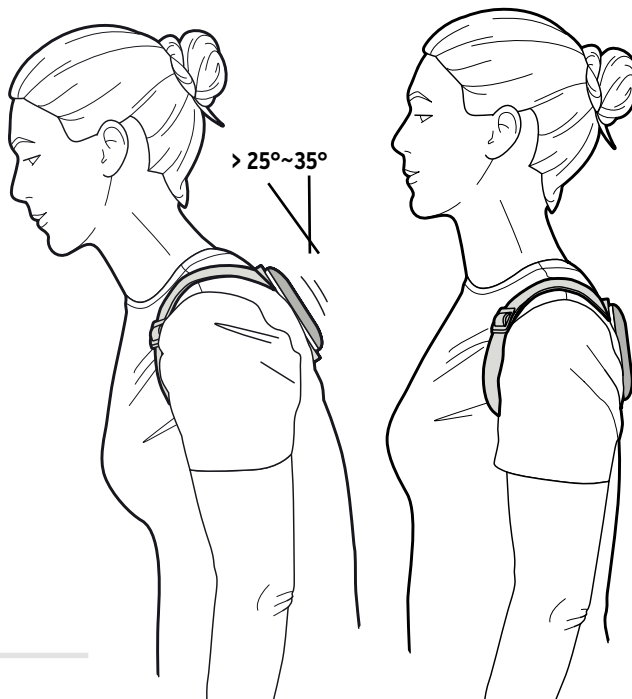

► Ak chcete prístroj vybrať z držiaka, posuňte ho nahor.

► Na nabíjanie akumulátora zapojte prístroj pomocou USB adaptéra do elektrickej siete.

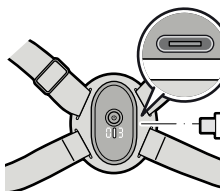

Vážení zákazníci!

Z dôvodu nášho moderného životného štýlu, ktorý nás často núti vykonávať činnosti v sede, si mnohí z nás zvyknú na zlé držanie tela. Väčšinou si ani nevšimneme, ako sa čoraz viac predkláňame a musíme sa doslova nútiť, aby sme sedeli a stáli vzpriamene.

Aby sme vám poskytli podporu pri udržiavaní vzpriamenej polohy, váš nový korektor držania tela vám prostredníctvom vibračného signálu pripomenie, aby ste si upravili držanie tela, len čo sa váš chrbát predkloní o viac ako 25°.

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniu alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpiť inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Korektor držania tela je určený na indikovanie nesprávneho držania tela a môže sa nosiť na odevu aj pod ním.
- Korektor držania tela je určený na súkromné použitie. Nie je vhodný pre kliniky, terapeutické ambulancie, fitness alebo wellness štúdiá atď. Korektor držania tela nie je zdravotnícka pomôcka a neslúži na zdravotnícku korekciu.
- V prípade pochybností alebo neistoty sa pred používaním opýtajte svojho lekára.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti vo veku 3 až 8 rokov, ak sú počas používania vždy pod dozorom dospelého človeka.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Deti smú tento prístroj čistiť výlučne pod dozorom. Prístroj si nevyžaduje žiadnu údržbu.

Nebezpečenstvo ohrozenia života pre osoby s kardiostimulátorom

- Elektrické a magnetické polia vytvárané týmto elektrickým prístrojom môžu za určitých okolností narušovať funkciu vášho kardiostimulátora. Intenzita týchto polí je však hlboko pod hraničnými hodnotami. Pred použitím tohto výrobku sa preto v každom prípade poraďte so svojím lekárom a výrobcou vášho kardiostimulátora.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok sa smie nabíjať len v suchých priestoroch v interiéri.
- Na nabíjanie používajte len vhodný USB sieťový adaptér s triedou ochrany II (symbol: , schválené pre domáce spotrebiče, s výstupom bezpečného nízkeho napätia (SELV) 5 V/max. 1 A (pozri aj „Technické údaje“) a iba s priloženým nabíjacím káblom. Nepoužívajte poškodený USB sieťový adaptér ani sa ho nepokúšajte opraviť. Nepoužívajte poškodený nabíjací kábel.
- Nepoužívajte a nenabíjajte prístroj v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vodou ani s inými tekutinami, ak je zapojený do elektrickej siete. Výrobok neponárajte počas nabíjania do vody ani iných tekutín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Prístroj pripájajte len do správne nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom použitého sieťového adaptéra.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas nabíjania, úplnom nabití prístroja, pri búrke alebo pred čistením prístroja.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

- Tento výrobok obsahuje lítiovo-polymérový akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov zabudovaný pevne a nedá sa vymontovať bez poškodenia telesa. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Výrobok nenabíjajte v blízkosti explozívnych plynov.
- **Pozor!** Lítiové akumulátory sa môžu vznietiť alebo explodovať,...

... ak sú počas používania, nabíjania, skladovania alebo prepravy vystavené extrémnemu teplu, napríklad slnku, ohňu atď., alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

... ak sú rozoberané, hádzané do ohňa alebo skratované. Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a inými zdrojmi otvoreného ohňa.

- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehovriajte/nerozoberajte. Neponárajte ich ani do vody.
 - Počas nabíjania sa prístroj nedá a nesmie používať. Na nabíjanie ho vždy zložte z tela.
 - Výrobok neuvádzajte do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia na výrobku alebo na priloženom nabíjacom kábli.
 - Na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni. Neodborná oprava môže predstavovať značné nebezpečenstvo pre používateľa.
- POZOR – Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd**
- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
 - Nesadajte si na prístroj! Nekladte na neho ani ťažké predmety. Došlo by k jeho poškodeniu.
 - Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

▷ Prístroj môžete na nabíjanie vybrať z držáka (obr. 5).

1. Prepojte USB-C nabíjaciu zdierku prístroja pomocou nabíjacieho kábla s vhodným USB sieťovým adaptérom a zapojte ho do sieťovej zásuvky. Kontrolka svieti na červeno.

Akumulátor je plne nabitý, keď kontrolka svieti na zeleno.

2. Odpojte sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky a vytiahnite sieťový kábel. Doba nabíjania pri vybitom akumulátore je približne 1 hodina. Prevádzkový čas pri plne nabitom akumulátore sú približne 3 hodiny.

- Ak bliká červená kontrolka, je akumulátor takmer vybitý a musíte ho nabiť.
- Prístroj sa počas nabíjania nesmie používať.



- Prístroj nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátora je najlepšia pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolia, tým kratší je prevádzkový čas.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 3 mesiace. Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skraca.

Použitie

Korektor držania tela môžete nosiť pod odevom alebo na ňom.

1. Nastavte si popruhy na paže tak, aby prístroj tesne priliehal na vašom tele, ale nesmie vám stláčať plec.

1. Na zapnutie prístroja podržte spínač zap./vyp.  stlačený, kým prístroj 4x nezavibruje... Kontrolka svieti modro-bielo.

Len čo predkloníte hornú časť tela o viac ako cca 25°, prístroj reaguje opakovanými krátkymi vibráciami, kým sa opäť nevystriete.

Displej vedľa kontrolky počítá, ako často prístroj zareagoval na nesprávne držanie tela. Pri vypnutí sa tento počet vymaže a pri opätovnom zapnutí začína od nuly.

▷ Na vypnutie prístroja podržte spínač zap./vyp.  stlačený.

Ošetrovanie

UPOZORNENIE – Vecné škody

- Neponárajte prístroj do vody ani do iných kvapalín.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

▷ Pred čistením odpojte prístroj z elektrickej siete.

▷ V prípade potreby utrite prístroj mierne navlhčenou handričkou. Popruhy môžete prať ručne vo vlažnej vode. Nechajte ich potom schnúť na vzduchu. Neukladajte na kúrenie!

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Pri nesprávnom skladovaní a likvidácii môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie vaša samospráva. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom dvore vašej samosprávy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná manipulácia je riskantná. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Technické údaje

Model:	727 231
Akumulátor:	lítiovo-polymérový 3,7 V  150 mAh (symbol  znamená jednosmerný prúd) menovitá energia: 0,555 Wh (testované podľa UN 38.3)
Doba nabíjania:	cca 1 hodina
Max. doba prevádzky:	cca 3 hodiny
Vstupný výkon:	DC 5 V/1,0 A (SELV)
Menovitý výkon:	2,5 W
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave:	0,3 W
Trieda ochrany:	III 
Sieťový adaptér (nie je priložený):	
Vstup:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Výstup:	DC 5 V 1,0 A
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Informácie o použitom akumulátore:	
Výrobca:	Dongguan Xintongda Electronic Technology Co., Ltd. No. 31, Renmin Road, Qinghuitou Town, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, Room 401, PR China
E-mail:	2682104208@qq.com
Model:	402030 3.7V 150mAh
Dátum výroby:	2025/10
Made in:	Čína



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 727 231